

# FIF Mobile

---

## Handbuch



## UNSERE APP

*FIF Mobile* ist eine Lösung für die 3D-Vermessung von Füßen, Trittschaumabdrücken und Schuhsohlen zur Herstellung individueller Einlagen. Die App ist intuitiv zu bedienen und in unser FIF-Komplettsystem integriert.

Unsere App greift auf die TrueDepth-Kamera zu und ist somit auf allen Apple-Geräten mit Face-ID lauffähig.

Führen Sie Messungen durch und senden Sie sie anschließend an Ihre feetinform-Station oder Ihren Produktionspartner.

Getreu dem Motto: **Keep it simple.**


### IHRE VORTEILE

- Intuitive Bedienung
- Individuell anpassbar
- Immer zur Hand
- Speziell für die Orthopädie-  
schuhtechnik entwickelt

# FIF Mobile – der 3D-Scanner to go

# ERSTE MESSUNG

Das Herzstück von FIF Mobile: die Fußvermessung.

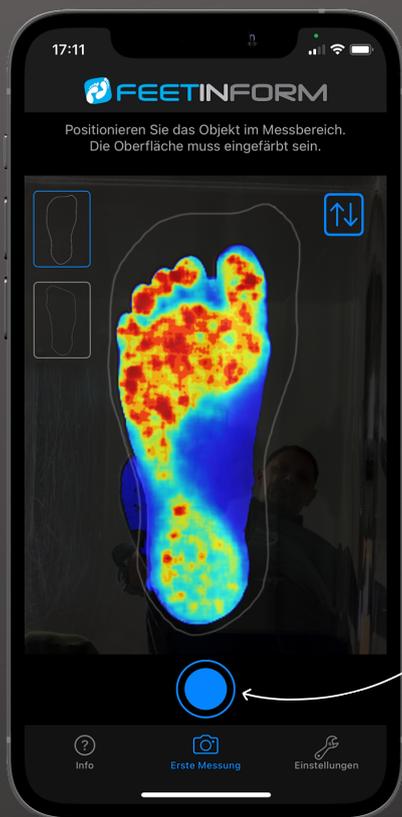

Nach dem Starten der App landen Sie direkt im Messfenster

Positionieren Sie den Fuß Ihres Patienten im vorgegebenen Umriss. Das Messobjekt muss einen Abstand von 25 bis 35 cm zur Frontkamera haben. Dann wird es farblich markiert und gemessen.

Lösen Sie die Messung durch einen Klick auf den blauen Punkt aus.

## Tipp 1:

Der Timer ist standardmäßig auf 5 Sekunden eingestellt. In dieser Zeit können Sie den Fuß in die richtige Position bringen.


## Tipp 2:

Für eine einfache und genaue Messung bietet feetinform verschiedenes Zubehör an. Probieren Sie die Scanbox für eine Vermessung im Stehen, den Handyständer für die Trittschaumvermessung oder das Scanboard für eine Vermessung im Sitzen aus.

## ZWEITE MESSUNG



Führen Sie die Messung des zweiten Fußes durch und überprüfen Sie Ihr Ergebnis.

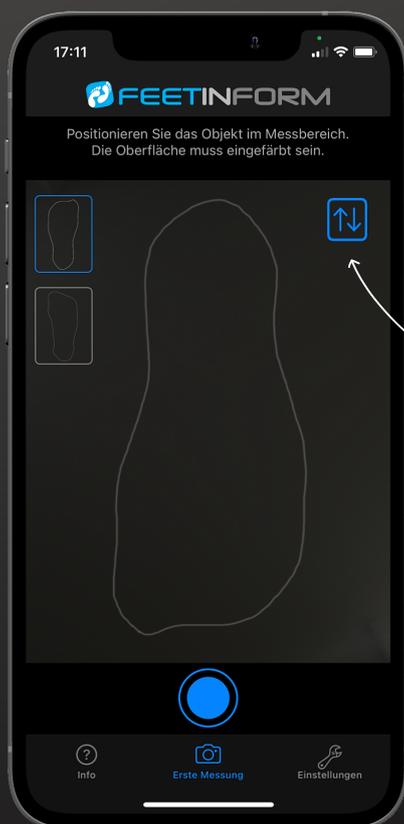


### Tipp 3:

Passen Sie den angezeigten Umriss bei Bedarf an die Ausrichtung des Fußes an.

Klicken Sie dazu auf das Symbol mit den gegenläufigen Pfeilen in der rechten oberen Ecke des Messfensters.


## MESSUNGEN PRÜFEN / WIEDERHOLEN

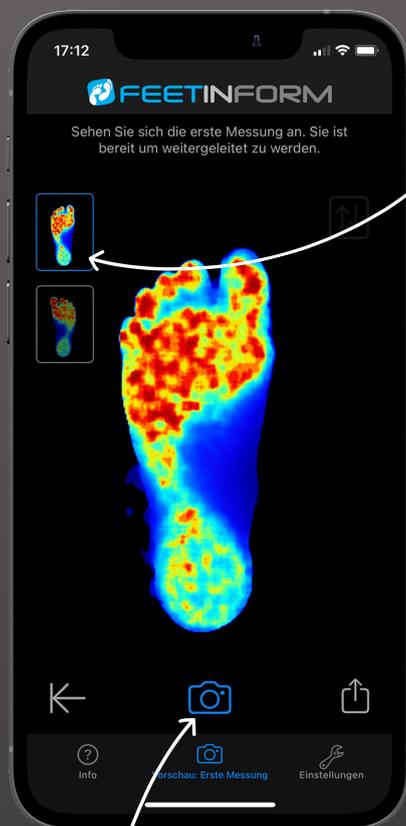

Klicken Sie auf die Miniaturansichten in der oberen linken Ecke, um die entsprechende Messungen anzuzeigen.


### Tipp 4:

Um einzelne Messungen zu wiederholen klicken auf das Foto-Symbol.

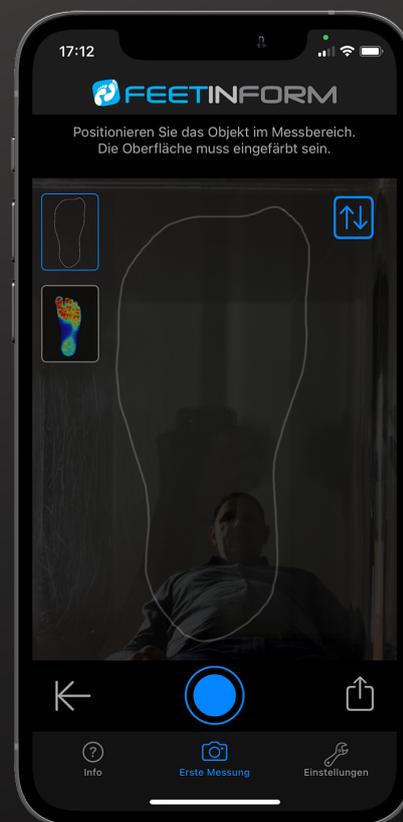

# SENDEN

Sind Sie mit der Fußvermessung fertig? Dann geht's ab in die Produktion!

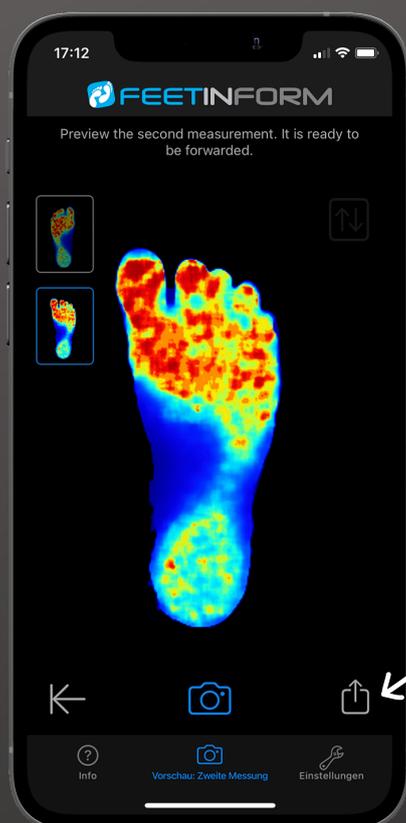


Klicken Sie auf das Sende-Symbol, um die Messungen zu verschicken.

Schreiben Sie die entsprechenden Informationen in die E-Mail und klicken Sie auf Senden.



## GESAMTE MESSUNG NEUSTARTEN

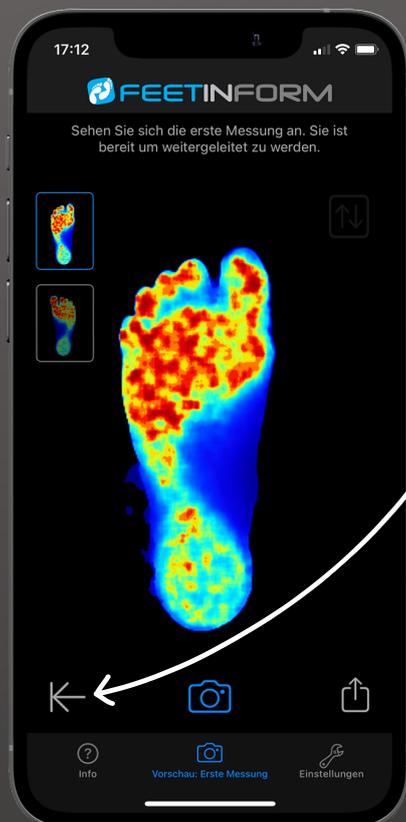

Möchten Sie den gesamten Messvorgang zurücksetzen, dann tippen Sie auf das Pfeil-Symbol in der linken unteren Ecke. Daraufhin können Sie einen neuen Messvorgang starten.

### Tipp 5:

Verwenden Sie diese Funktion, um einen neuen Kunden zu vermessen.



# EINSTELLUNGEN / TIMER


Individuelle Einstellungen für individuelle Vermessungen.



Im Reiter "Einstellungen" können Sie die App individuell anpassen.

Anpassbar sind:

- der Timer,
- die Orientierung des Fußumrisses,
- das Standard-Messobjekt und
- der Zielort.

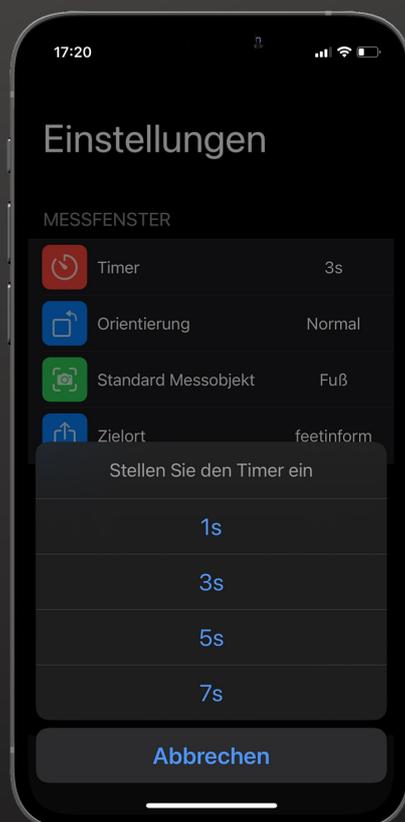

Mit dem Timer bestimmen Sie die Sekunden bis zum Auslösen der Messung. Verschaffen Sie sich genug Zeit, um das Messobjekt in die richtige Position zu bringen.

## ORIENTIERUNG / STANDARDMESSOBJEKT



Legen Sie die Ausrichtung des Fußumrisses für einen möglichst bequemen Messvorgang fest.



Nach dem Klick auf "Teilen" werden Sie nach dem Messobjekt gefragt: Fuß, Trittschaum oder Einlage. Wenn Sie immer das gleiche Objekt messen, dann können Sie es direkt in den Einstellungen festlegen und werden später nicht mehr danach gefragt. Andernfalls belassen Sie diese Einstellung bei dem Standardwert "Alle".

# ZIELORT



Bestimmen Sie den Empfänger Ihrer Messungen.

Wählen Sie "feetinform", wenn Sie die Messungen an uns direkt senden wollen.

Wählen "allgemein", wenn Sie den Zielort bei jedem Teilen bestimmen wollen.

# SUPPORT



Sie haben Fragen zu App oder möchten uns Ihr Feedback mitteilen? Dann kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular oder über Social Media.



[www.feetinform.de/kontakt](http://www.feetinform.de/kontakt)



[www.facebook.com/feetinform](http://www.facebook.com/feetinform)



[info@feetinform.de](mailto:info@feetinform.de)



[www.instagram.com/feetinform\\_gmbh/](http://www.instagram.com/feetinform_gmbh/)



0721 2040175

Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude und gutes Gelingen mit *FIF Mobile*.